
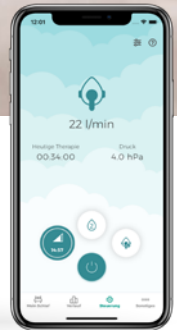
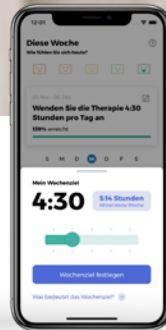


prisma APP

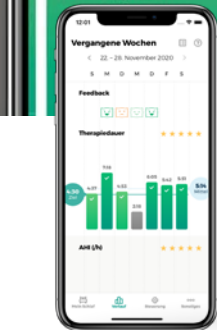

**Aplikácia pre prepojenie
Vášho zariadenia s telefónom.
Sledujte postupné zlepšovanie
Vášho spánku.**

Sledujte kvalitu
vašej terapie a tiež
ako sa Váš spánok
postupne zlepšuje.

Majte
možnosť vidieť
detailnú informáciu
o Vašej terapii.

Stanovte si
vlastné ciele,
ktoré by ste chceli
dosiahnuť v rámci
Vášho spánku.

Ovládajte Vaše
zariadenie
pomocou
chytrého
telefónu.



Možnosti použitia aplikácie **prisma APP**

SLEDOVANIE VLASTNÉHO POKROKU

- denný prehľad
- prehľad z posledného týždňa
- kompletný prehľad za celé obdobie

OVLÁDANIE PRÍSTROJA

- start/stop terapie
- ovládanie zvlhčovača
- nastavenie nábehovej rampy
- test tesnosti masky
- prípadne nastavenie ďalších komfortných funkcií

NÁHLAD NA KVALITU TERAPIE

- počet výpadkov dýchania
- odhadovaná doba používania
- detekcia hlbokého spánku
- tesnosť masky

STANOVENIE VLASTNÝCH CIEĽOV

Možnosť stanovenia vlastných cieľov, ktoré by ste chceli v rámci terapie dosiahnuť.

TECHNICKÁ PODPORA


V prípade technických problémov, aplikácia obsahuje tipy a rady ako si s týmito problémami poradiť. Prípadne umožňuje odoslať správu pracovníkovi technickej podpory.

GENEROVANIE REPORTU O TERAPII

Možnosť generovania správy obsahujúcej informácie o Vašej terapii, ktorú je možné odoslať Vašmu lekárovi alebo ošetrovateľovi.

Všetky dáta o Vašej terapii a Vašich osobných údajoch sú zabezpečené.

Návod na pripojenie zariadenia k telefónu

1. Aktivujte si Bluetooth na Vašom zariadení. Akonáhle bude Bluetooth aktívny, na Vašom zariadení sa objaví táto ikonka 

V prípade čierneho zariadenia stačí len pripojiť externý modem.



Zariadenie s dotykovým displejom



Zariadenie bez dotykového displeja

V prípade bieleho zariadenia býva Bluetooth štandardne už aktivovaný. Mali by ste teda vidieť na displeji vpravo hore ikonku . Pokiaľ ikonku nevidíte, postup pre aktiváciu Bluetooth je nasledujúci:



1. Stlačte **Menu** tlačidlo



2. Stlačte tlačidlo **+**, aby ste sa dostali do Nastavenia



3. Stláčajte tlačidlo **Rampa** pokiaľ sa na displeji neobjaví nápis **BLUE**



4. Stlačím tlačidla **+** zapnete Bluetooth (na displeji sa objaví ON)



5. Stlačím tlačidla **Rampa** svoju voľbu potvrdíte



6. Stlačím tlačidla **START** sa vrátite do hlavnej ponuky

2. Stiahnite si aplikáciu prisma APP do svojho mobilu. Aplikáciu nájdete ako v App Store, tak aj v Google Play.



3. Zapnite na Vašom telefóne Wifi, Bluetooth a Polohu a otvorte aplikáciu prisma APP.

4. V prípade, že spúšťate aplikáciu prisma APP prvýkrát, kliknite na tlačidlo **Spojenie nového terapeutického prístroja**.



5. Následne vyberte z ponuky **Vaše zariadenie.**



V prípade čierneho zariadenia

V prípade čierneho zariadenia stačí do aplikácie zadať sériové číslo, ktoré nájdete na boku prístroja




V prípade bieleho zariadenia


1. V prípade bieleho prístroja najprv stlačte na 5 s tlačidlo Menu, pokiaľ sa na displeji neobjaví animácia pre párovanie prístroja



2. Potom stačí kliknúť v aplikácii na **Hľadať prístroj**

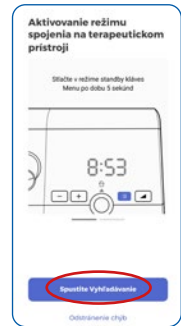


3. Následne stačí iba v aplikácii **potvrdiť spárovanie** a tiež na prístroji stlačiť tlačidlo **Rampa**

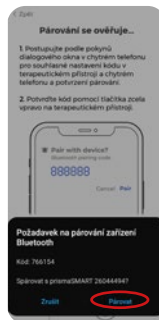

6. Ďalšie razy sa už Váš prístroj a telefón spoja automaticky. Stačí mať len vždy zapnuté Bluetooth a Wifi.

7. Následne Vám aplikácia ponúkne vytvorenie účtu. Aplikáciu je možné používať aj bez vytvorenia účtu, ale pre správne fungovanie aplikácie takúto možnosť doporučujeme.

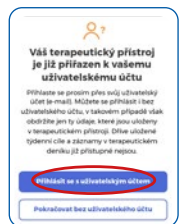

V prípade akýchkoľvek technických problémov neváhajte kontaktovať našu technickú podporu!